


**STEP 1**

お湯に浸漬




**STEP 2**

その場で形を調整

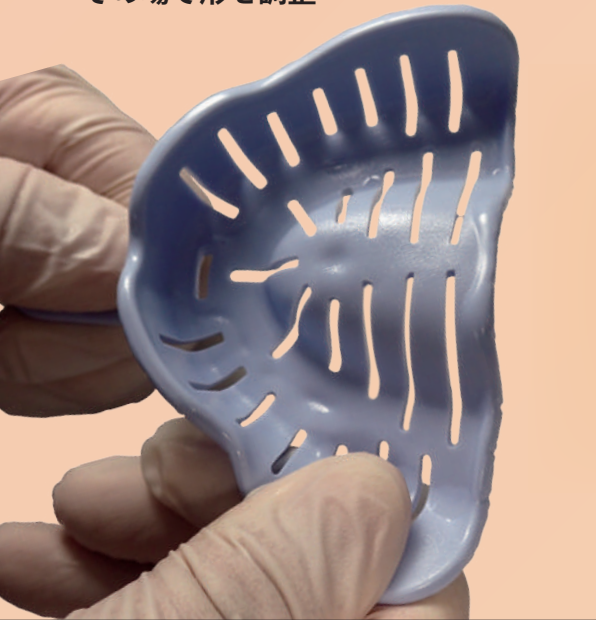

**STEP 3**

トランスフォーム完成

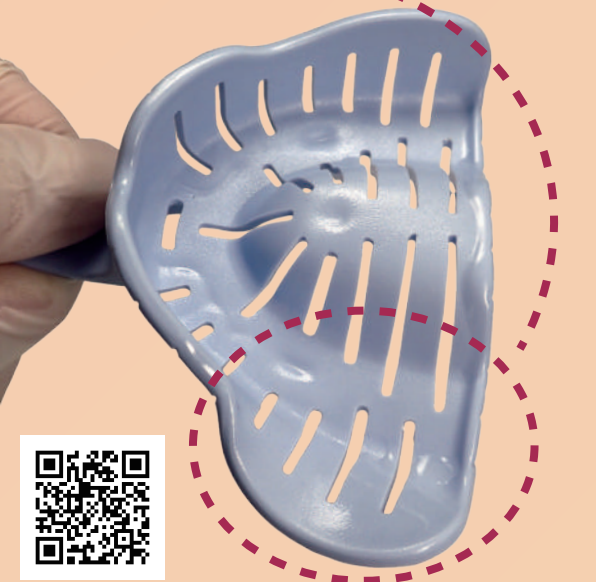

お手軽価格で  
感染予防に一役

**Astek** **TransForm**™  
Astek  
INNOVATIONS

HEAT MOULDABLE IMPRESSION TRAYS

トランスフォームトレー

しかも!!



トレーの形

由



在

特別  
価格

でご提供

2020.11.21 ▶ 2021.01.20



製品動画はこちら

## お湯で形を変えられる

70℃以上のお湯に 20 秒間漬けるだけ  
 浸漬時間を調整すればポットのお湯でも使えます  
 お湯で変形させた後に流水で冷やせばトレーに硬さが戻ります

- ※ 歯列不正の印象が簡単に
- ※ 骨隆起にも対応

## 気軽に使える価格


1 個当たり約 108 円  
 しかも変形するので多くのトレーを用意せずに済みます

## 圧接しやすいデザイン

印象材を圧接しやすいようにフィンガーパッドを付与  
 維持溝は撤去時の歪みを防止します

## 有歯顎用

特別  
価格

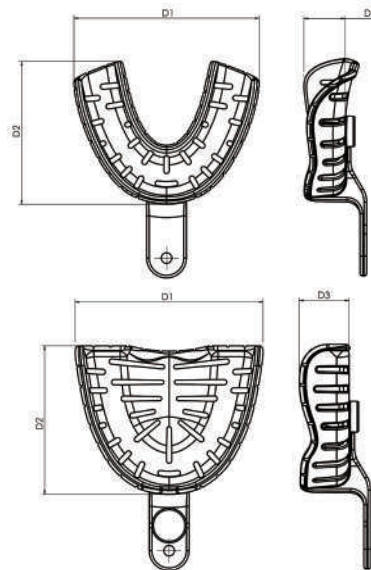


単位：mm

番号	D1	D2	D3
#1 (紫)	74	60	16
#2 (紫)	79	60	21
#3 (青)	70	54	15
#4 (青)	71	56	18
#5 (緑)	66	50	14
#6 (緑)	66	49	20
アソート	各規格 2 入		

単回使用  
 写真、イラストともに実物大ではありません  
 標準医院価格：12 個入 / ~~1,300~~ 円

## 無歯顎用

特別  
価格

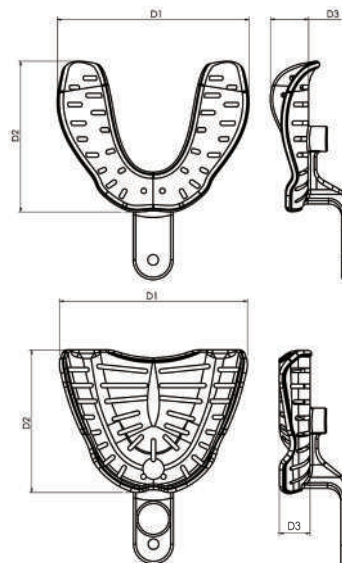

単位：mm

番号	D1	D2	D3
#7 (紫)	76	60	17
#8 (紫)	76	59	13
#9 (青)	72	57	14
#10 (青)	71	54	12
#11 (緑)	64	53	13
#12 (緑)	65	49	10
アソート	各規格 2 入		

単回使用  
 写真、イラストともに実物大ではありません  
 標準医院価格：12 個入 / ~~1,300~~ 円