

破折を防ぐ コメット メタルクラウン除去用
カーバイドバー(FG)



Quality Products
Made in Germany

H34

増量キャンペーン

キャンペーン期間：2021.2/22 ~ 3/19




H34-012




FG330

切れ味を高めるブレード

ラージブレード&ディープクロスカットで
メタルクラウンを素早く除去

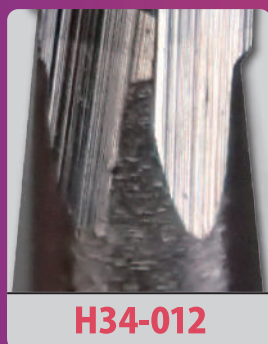

H34-012

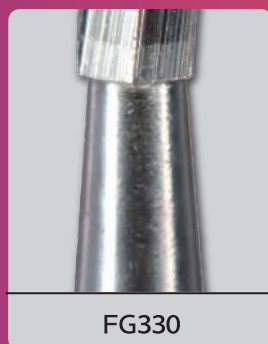

FG330

太いネックが破折を防ぐ

FG#330 と比べると約2倍の太さで
破折を低減



H34-012



FG330

振動を抑えるチップスペース

目詰まりを防ぐ大きなチップスペースが
低振動をもたらし、術者や患者様への
不快感を軽減

H34

メタルクラウン撤去用 カーバイドバー(FG)



Quality Products
Made in Germany

増量キャンペーン

キャンペーン期間：2021.2/22 ~ 3/19



標準医院価格
10本 **10,000** 円

+



標準医院価格
1本 **1,000** 円

= **11 本入**



金パラ合金もザクザク切れます！



資料ご提供：荒木基之先生（荒木歯科医院、大阪府茨木市）

製品動画はこちら



POINT


破折を防ぐクラウン撤去の方法

メタルクラウンの撤去はバーを歯頸部から切端に向けて使用して下さい。
その際、バーを約45度の角度でメタルに接触させ表面を一層ずつ剥ぐように何度かに分けて行って下さい。
(左図参照)

5倍速コントラでのご使用を推奨いたします。

適正回転数：16万回転

(タービンでのご使用はトルク不足により十分な切削能が発揮されない可能性と、高回転によるヘッド破折の危険性が高まる恐れがあります)

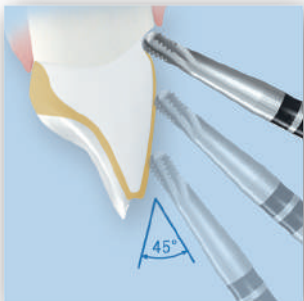

製品詳細

品番	H 34-010	H 34-012
作業長(mm)	2.0	2.0
最大径(mm)	1.0	1.2
全長(mm)	20.0	20.0
カラーコード	黒2本	黒2本
最高回転数	450,000	450,000

黒いイラストはほぼ実物大です

適正回転数：毎分 **16万** 回転

シャンク：FG

医療機器の分類：一般医療機器
一般的名称：歯科用カーバイドバー
販売名：コメットカーバイドバー
届出番号：27B2X00091000002



製造販売元
株式会社モモセ歯科商会

お問い合わせは

本社・大阪営業所 〒543-0054 大阪府大阪市天王寺区南河堀町 6-35 TEL 06-6773-3333 代
東京営業所 〒110-0016 東京都台東区台東 2-24-2 TEL 03-3835-2653 代
九州営業所 〒812-0893 福岡市博多区那珂 6-24-21 TEL 092-575-6060 代
URL：http://www.momose-dm.co.jp/