



Quality Products
Made in Germany

コメット カーバイドバー
H1SEMシリーズ(低速・CA用)

感謝祭


2021.6.21(月) ▶ 8.20(金)

「切れ味」と「耐久性」の未体験ゾーンへ
― 軟化象牙質除去に新しい選択肢 ―

お試しに!
1本入キャンペーン
も実施中

年に一度の特別価格でご提供!

お得な **5+1** 本入
バリューパック

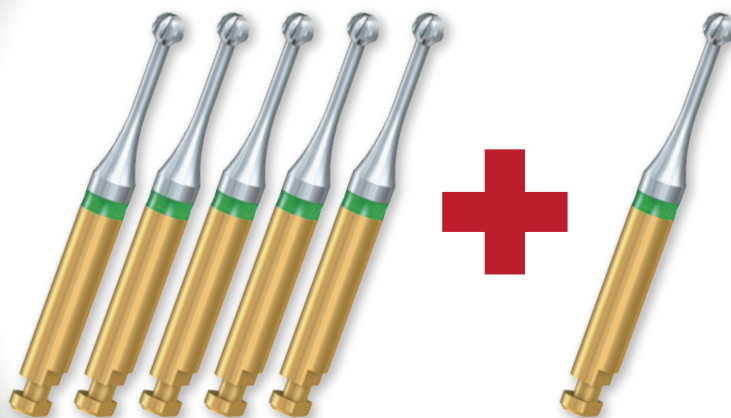

〈標準医院価格〉

5本 **4,900円**


〈標準医院価格〉

1本 **980円**

製品動画は
こちら



低速でもサクサク削れる

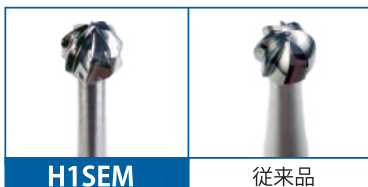

H1SEM

従来品

ビッカース硬度1600のカーバイド製。切れ味を高めるブレードデザインなので低速でも軟化象牙質をサクサク削れます。推奨回転数: 毎分1500回転

外科処置や肉芽の処置にも




錆びないカーバイド製

カーバイド製の作業部。オートクレーブでも錆びません。(軸部はステンレス製)

低振動なクロスカット

目詰まりを防止するクロスカット低振動で軟化象牙質を除去できます。

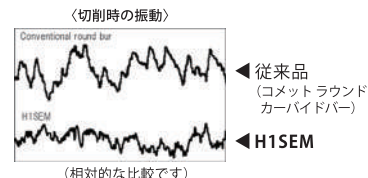

スリムネックで高い視認性



隣接面へのアクセスでも術野がしっかり見えます。

この切れ味・この耐久性を貴方に ——



従来、軟化象牙質の除去にはスチールバー(ビッカース硬度800)やステンレススチールバー(同600)が用いられてきた。スチールバーは耐腐食性が低く、ステンレススチールバーは切れ味が悪い。

このH1SEMはその欠点を補ってくれる製品である。素材には耐腐食性の高いタングステンカーバイド(同1600)が使われており、ステンレスやスチールと比較しても間違いに硬い。またその刃部にはクロスカット

が施されており、これにより従来のラウンドバーに比較して振動が少ない。

長期にわたって維持される鋭い切れ味で軟化象牙質除去をスムーズに低発熱で行え、低振動の恩恵で歯質の破折を予防できる。是非、未体験ゾーンへ。



資料ご提供: 高田歯科(兵庫県神戸市) 高田 光彦 先生

※記事は、先生のご経験に基づくものであり、効能・効果を保証するものではありません。ご使用の際は、添付文書等をお読みください。

単品詳細情報

品番	H1SEM-010 (US #2)	H1SEM-012 (US #3)	H1SEM-014 (US #4)	H1SEM-016 (US #5)	H1SEM-018 (US #6)	H1SEM-021 (US #7)	H1SEM-023 (US #8)
最大径 (mm)	1.0	1.2	1.4	1.6	1.8	2.1	2.3
CA	○	○	○	○	○	○	○
CA ロング	○	○	○	○	○	○	○
適正回転数	毎分1,000~1,500 rpm						
標準医院価格	980円(1本入) 4,900円(5本入)						

黒いイラストはほぼ実物大です
医療機器の分類: 一般医療機器

全長: CA 22mm / CA ロング 26mm
一般的名称: 歯科用カーバイドバー

最高回転数: 毎分10万回転
販売名: コメット カーバイドバー

届出番号: 27B2X00091000002



製造販売元

株式会社モモセ歯科商会

お問い合わせは

本社・大阪営業所 〒543-0054 大阪府大阪市天王寺区南河堀町 6-35 TEL 06-6773-3333 (代)

東京営業所 〒110-0016 東京都台東区台東 2-24-2 TEL 03-3835-2653 (代)

九州営業所 〒812-0893 福岡市博多区那珂 6-24-21 TEL 092-575-6060 (代)

URL: <http://www.momose-dm.co.jp/>